


INSTRUCCIONES DE USO

ANDADOR PLEGABLE

CODIGOS: DA-0742 - CA811L

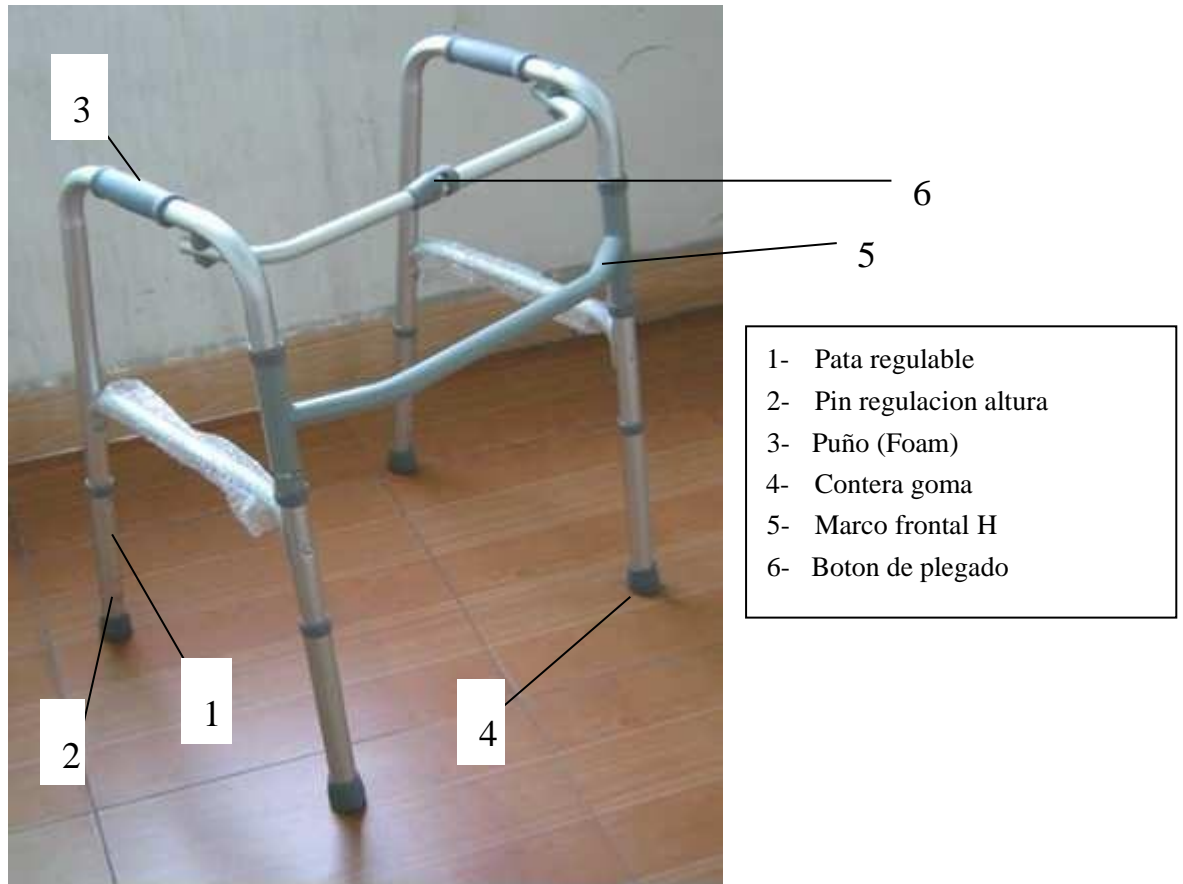

Se aconseja leer atentamente todo el manual antes de utilizar los asientos elevadores. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

DESCRIPCION

Este producto está fabricado con aluminio anodizado de alta calidad. Está indicado para proporcionar apoyo y asistencia a aquellos que no pueden caminar sin ayuda en pacientes con movilidad no eficiente debido a accidentes, discapacidad o vejez. Pacientes con falta de estabilidad, equilibrio y capacidad de locomoción. Es plegable, por lo que resulta fácil de transportar y almacenar. Posee conteras de goma antideslizantes, haciéndolo un andador muy estable. Tiene varios niveles de ajuste de altura.

USO

- 1) Antes de su uso ajuste la altura adecuada. Metodo de ajuste: presione el pin boton de las patas y tire arriba o hacia abajo hasta el orificio de la altura deseada, deje las cuatro patas en la misma altura.
- 2) Verifique que los mangos estén firmes y que el boton central de plegado esté visible por el orificio.
- 3) Verifique que las conteras de goma de las patas estén fijas y estables. Si aprecia desgaste, cámbielas por unas nuevas. Tenga precaución en días de lluvia o pendientes resbaladizas.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

- a. Controle que los tornillos esta apretados y el andador es estable antes de usar.
- b. Máxima carga 100kgs. No ser usado por personas que excedan del máximo de carga.
- c. Use detergente neutro y agua caliente para la limpieza. No utilice ningún producto abrasivo.
- d. Mantener el andador apartado de las zonas de calor.
- e. La vida útil del producto depende del desgaste de partes que no se pueden reparar o reemplazar.
- f. Solo debe usarse por un paciente.
- g. Periódicamente revisar los tubos, los tornillos y el estado de las conteras de goma por el desgaste.
- h. Tenga precaución cuando utilice el producto sobre superficies húmedas.
- i. No use el andador en escaleras o escaleras mecánicas.
- j. No cuelgue nada en el producto ya que podría desequilibrarlo y hacer que se caiga.
- k. Muévase despacio y en pequeños pasos para asegurarse de que la distribución de su peso sea uniforme y estable.
- l. Cuidado durante su plegado o desplegado de no pillarse los dedos.
- m. No camine hacia atrás.
- n. Asegúrese que los pomos de regulación estén apretados y al mismo nivel de altura.
- o. No lo utilice para transportar objetos.
- p. No utilizar los andadores en pendientes de 7° o superiores.
- q. No utilizar el andador para bajar cuestras,...
- r. Comprobar que todas las patas están estables y en contacto con el suelo en todo momento.
- s. El paciente debe informar de cualquier accidente grave que haya ocurrido en relación con el andador al fabricante o importador o distribuidor y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el paciente.

CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

Está prohibido eliminar el andador junto con los desechos urbanos. Para su eliminación depositarlo en un centro ecológico municipal o empresa especializada para ello.

SIMBOLOS

| | |
|---|-------------------------------------|
|  | Código producto |
|  | Identificación unívoca de productos |
|  | Marcado CE |
|  | Fabricante |
|  | Lote de producción |
|  | Leer el manual de instrucciones |
|  | Producto sanitario |
|  | Condiciones de eliminación |

DATOS TECNICOS

Altura: 78—96 cm

Largo: 46 cm

Ancho: 54 cm

Peso: 2.5 KG

Carga máxima: 100 kgs.



GARANTIA

Los andadores son garantizados por un periodo de 3 años a partir de la fecha de compra por todos los fallos debidos demostrablemente a fallos de material o de fabricación. La garantía quedará anulada en caso de utilización indebida. Durante el plazo de vigencia de la garantía, todos los componentes defectuosos del producto serán sustituidos o reparados gratuitamente. Quedan excluidos los componentes sometidos a desgaste.



Fabricante:
FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., Ltd
Pingnan Industrial Area, Cuicheng Nanhai
District.
528251 Foshan city, Guangdong CHINA
SNR: CN-MF-000008483



Representante autorizado:
SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909 VA Capelle aan den IJssel NEDERLANDS
SNR: NL-AR-000000247



Importador:
QUISMONDO INVERSIONES S.L.
Calle JERICÓ, 3 1º A,
28007 - MADRID (ESPAÑA)
SNR: SRN: ES-IM-000037967

