

ANDADOR 8860L, GUÍA DEL USUARIO

Qué está incluido



- A- ANDADOR
- B- BOLSA
- C- RESPALDO

Identificación de piezas



- A- Manijas con frenos
- B- Asiento
- C- Respaldo
- D- Bolsa
- E- Ruedas delanteras
- F- Ruedas traseras
- G- Botón de ajuste de altura
- H- Asa para plegar el asiento
- I- Mando de ajuste de respaldo
- J- Cables de freno
- K- Zapatas de freno

Uso y cuidado



Uso de los frenos de mano

Para usarlo mientras camina, apriete los frenos para reducir la velocidad.



Para bloquear los frenos cuando use el andador como asiento, empuje hacia abajo para bloquear los frenos. Suelte los frenos tirando hacia arriba cuando esté listo para usar el andador nuevamente.

Plegar y desplegar el andador



Para desplegar, presione hacia abajo los lados del asiento con palmas de las manos apoyadas en el asiento. No agarre la barra del asiento ya que esto puede causar leve atrapamiento.



Para plegar tire del asa del asiento



Para ajustar la altura del mango, utilice los botones y deslice el manijas a la altura deseada.











Para ajustar la altura del respaldo, afloje las perillas en ambos lados y deslice el respaldo a la altura deseada. Apriete ambas perillas.

En cumplimiento con la Normativa Europea 2017/745 para productos sanitarios de clase I, este artículo tiene pegada una etiqueta con el marcado CE, información relativa al fabricante, representante europeo e importador.

Condiciones de eliminación

Está prohibido eliminar el andador junto con los desechos urbanos. Para su eliminación depositarlo en un centro ecológico municipal o empresa especializada para ello.

Simbolos

-  **CODIGO PRODUCTO**
-  **IDENTIFICADOR UNICO DEL PRODUCTO**
-  **MARCADO CE**
-  **FABRICANTE**
-  **LOTE DE PRODUCCION**
-  **LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES**
-  **PRODUCTO SANITARIO / MEDICAL DEVICE**
-  **CONDICIONES DE ELIMINACION**

BASIC UDI: 697222325030001JS

Garantia

Los andadores son garantizados por un periodo de 3 años a partir de la fecha de compra por todos los fallos debidos demostrablemente a fallos de material o de fabricación. La garantía quedará anulada en caso de utilización indebida. Durante el plazo de vigencia de la garantía, todos los componentes defectuosos del producto serán sustituidos o reparados gratuitamente. Quedan excluidos los componentes sometidos a desgaste.



Fabricante:
FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., Ltd
Pingnan Industrial Area, Cuicheng Nanhai
District.
528251 Foshan city, Guangdong CHINA
SNR: CN-MF-000008483

Representante autorizado:
SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909 VA Capelle aan den IJssel NEDERLANDS
SNR: NL-AR-000000247



Importador:
QUISMONDO INVERSIONES S.L.
Calle JERICÓ, 3 1º A,
28007 - MADRID (ESPAÑA)
SNR: SRN: ES-IM-000037967

